

Bibliothèque SIDIGITAL

Exocad Instructions Installation

Téléchargez et installez la bibliothèque Exocad de Southern Implants en 3 étapes simples.

ETAPE 1

CONNECTEZ-VOUS À LA PAGE SIDIGITAL

ETAPE 2

SUPPRIMEZ LES ANCIENNES BIBLIOTHÈQUES
(UNIQUEMENT POUR LES UTILISATEURS EXISTANTS)

STEP 3

INSTALLEZ LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE

ETAPE 1

ETAPE 1.1

Naviguer vers la page CAD/CAM - SIDIGITAL

Visitez southernimplants.fr et accédez à la page web en survolant l'onglet "Produits & Services" dans la barre de menu et cliquez sur "Bibliothèque CAD/CAM"

southernimplants.fr/bibliothèque-cad-cam

The screenshot shows the Southern Implants website interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: "Produits & Services", "Innovations & Solutions", "Digital Workflow", "SIACADEMY", "Evenements & Congrès", and "A propos". The "Produits & Services" menu is open, displaying a list of options: "Solutions Implantaires", "Solutions prothétiques", "Service ZyoBox", "Solution Régénération Osseuse", "Solution d'obturation canal prothétique", and "Bibliothèque CAD/CAM". The "Bibliothèque CAD/CAM" option is highlighted with a red box. Below the menu, the main content area features the heading "Bibliothèque CAD/CAM SiDigital" and a paragraph of text: "Afin de télécharger nos bibliothèques CAD / CAM disponible pour 3Shape, Exocad et DentalWings, il vous faudra remplir le formulaire en cliquant sur le lien ci-dessous. Les informations seront examinées par nos représentants qui vous enverront vos fichiers une fois approuvé." At the bottom of the page, there is a yellow button with the text "Accéder à la bibliothèque", which is also highlighted with a red box.

ETAPE 1.2 Créer un nouveau compte/Se connecter

POUR LES NOUVEAUX UTILISATEURS

Créez un compte en cliquant sur « Cliquez ici pour vous inscrire ».

POUR LES UTILISATEURS EXISTA

Accédez à l'écran de connexion en cliquant sur « Cliquez ici pour télécharger ».



Accueil ▾ Solutions de traitement ▾ Produits innovants ▾ CAO/FAO - SIDigital ▾ Actualités et Evénements ▾ Centre de ressources ▾ Contactez-Nous 🔍

Bienvenue dans les bibliothèques SIDigital de Southern Implants pour :

3shape

instructions d'installation

dental wings

instructions d'installation

exocad

instructions d'installation

Nouvel utilisateur:

[Cliquez ici pour vous inscrire](#)

**Connexion des utilisateurs existants et
nouvellement enregistrés :**

[Cliquez ici pour télécharger](#)

Complétez et soumettez le formulaire. Un e-mail de confirmation contenant vos données de connexion vous sera envoyé dans les jours qui suivent. Vérifiez vos e-mails indésirables si vous ne le recevez pas dans les 48 heures. Accédez à la page de connexion en cliquant sur le lien figurant dans l'e-mail ou en retournant à l'adresse suivante : <https://southernimplants.com/cad-cam-download/>

From: sidigital@southernimplants.com
Sent:
To:
Subject: SI Digital Library Login Details

Good day,

Thank you for registering to SIDigital. To download, click on this link [Access SIDigital](#)

Username:

Password:

Kind regards,
SI Digital Team

Saisissez votre mot de passe et votre adresse électronique
(n'oubliez pas de procéder à la vérification CAPCHA).


Connectez-vous pour télécharger les bibliothèques CAD/CAM :

Ce contenu est protégé par mot de passe. Pour accéder au contenu, veuillez saisir votre mot de passe ci-dessous:

>> [Mot de passe oublié ?](#)

Mail:

Mot de passe:

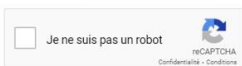

ETAPE 1.3 Télécharger la bibliothèque Exocad

Cliquez sur le bouton "Télécharger la dernière version" d'Exocad pour lancer le téléchargement.

Download SIDigital Libraries

Please choose your software: [For any queries, contact: sidigital@southernimplants.com](mailto:sidigital@southernimplants.com)

 3 Shape USA Encrypted Download latest version	 3 Shape Download latest version	 Dental Wings Download latest version	 Exocad Download latest version
3 Shape USA Encrypted Change Log	3 Shape Change Log	Dental Wings Change Log	Exocad Change Log

REMARQUE : Un récapitulatif des modifications de toutes les révisions de la bibliothèque est disponible en bas de l'écran.

ETAPE 2


SUPPRESSION DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE PRÉCÉDENTE

(UTILISATEURS EXISTANTS UNIQUEMENT)

ETAPE 2.1

Supprimer la bibliothèque Exocad enregistrée sur votre ordinateur local

Accédez à votre disque dur local (C: ³) et supprimez le dossier " Exocad " existant de Southern Implants.

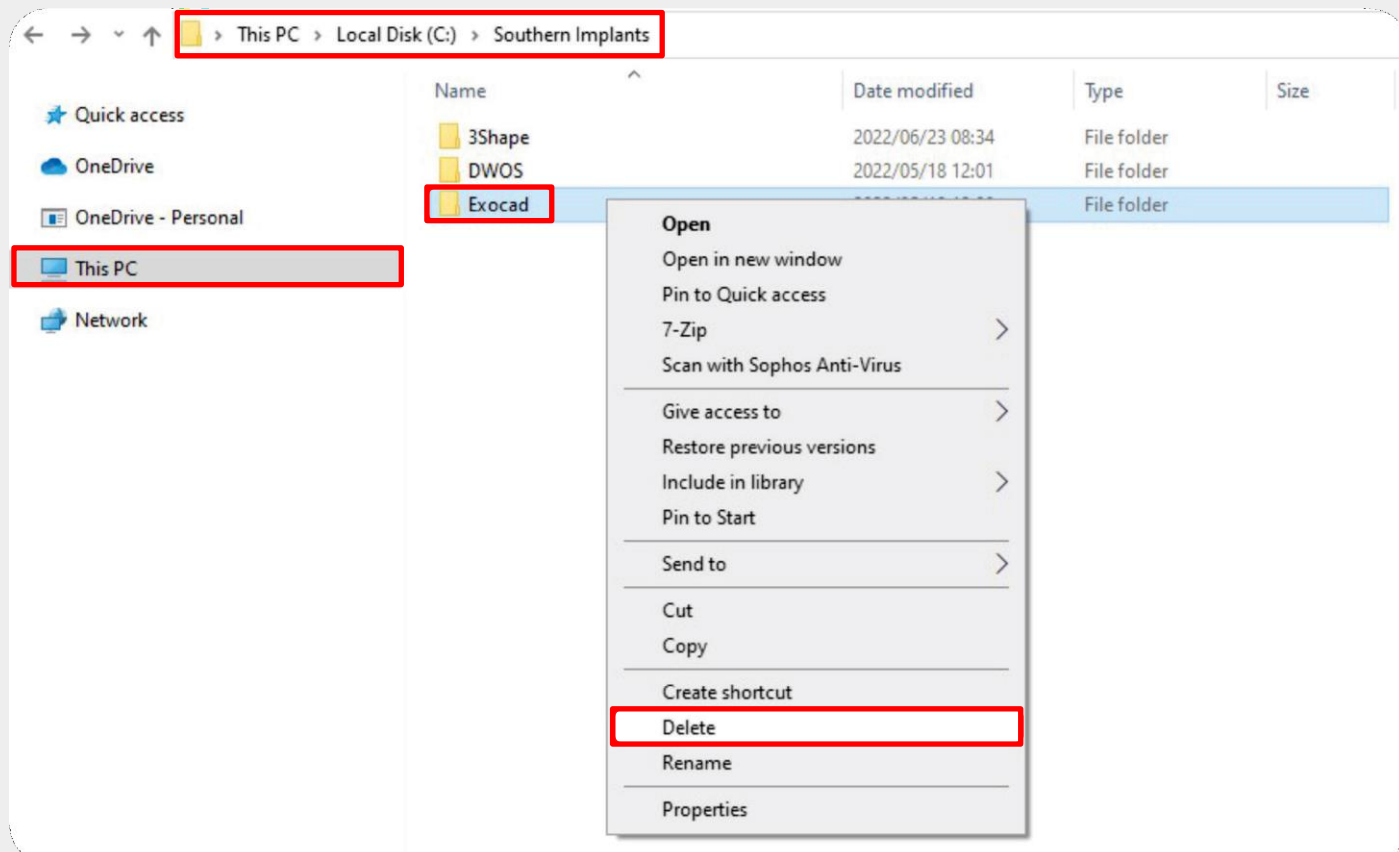


Dans les cas où la bibliothèque précédente était installée à un autre endroit, il est essentiel que l'utilisateuse rende dans le bon répertoire et supprime la bibliothèque.

ETAPE 2.2

Supprimez la bibliothèque de piliers Exocad enregistrée sur votre ordinateur local.


Accédez au dossier de la bibliothèque de piliers d'Exocad (qui se trouve dans le dossier d'installation d'Exocad, dans le répertoire de fichiers DentalCADApp/library/implant) et supprimez tous les dossiers de kits de piliers de Southern Implants.

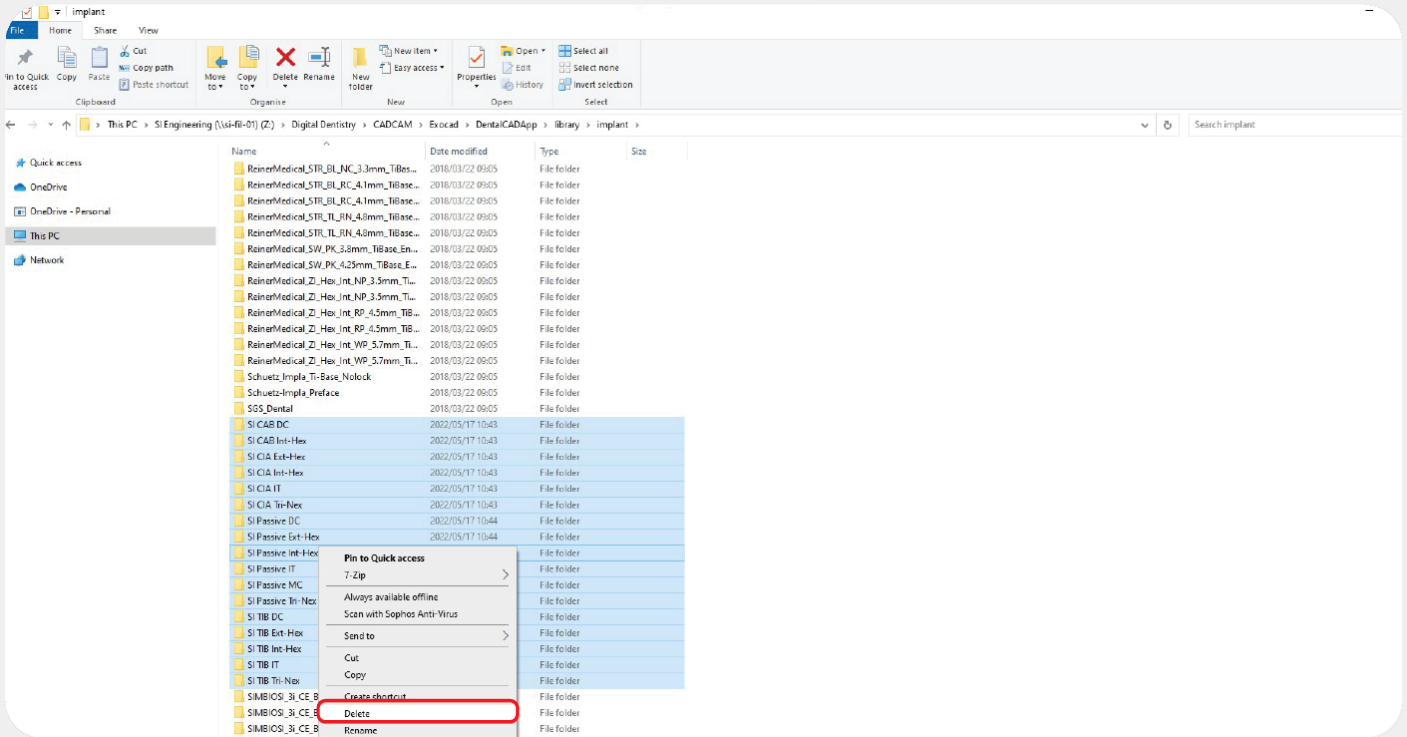

ETAPE 2.3

Supprimer les kits modelcreator sauvegardés sur votre ordinateur local

Accédez au dossier de la bibliothèque des kits de piliers Exocad (qui se trouve dans le dossier d'installation d'Exocad, dans le répertoire de fichiers DentalCADApp/library/modelcreator/implants) et supprimez tous les dossiers des kits de création de modèles Southern Implants.

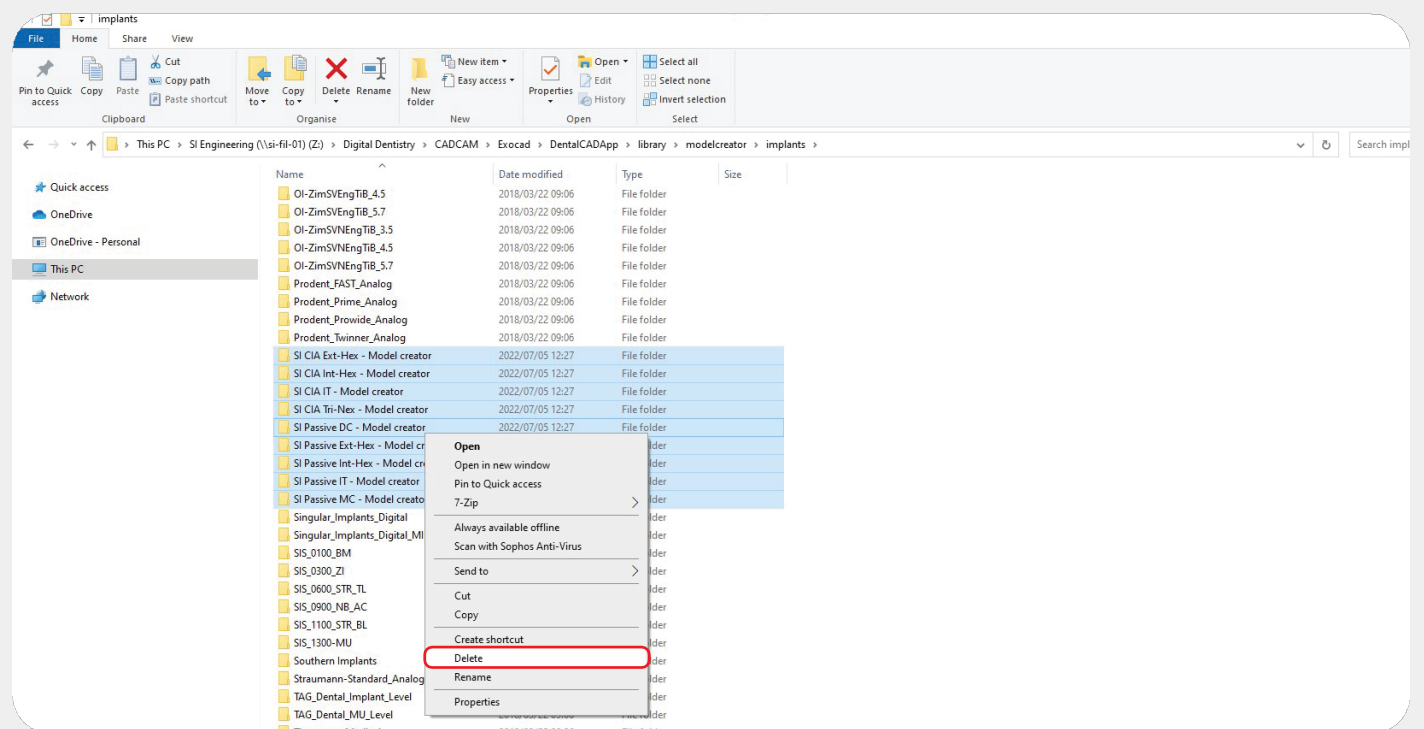



La bibliothèque est maintenant supprimée.

ETAPE 3

ETAPE 3.1

Accédez au fichier de la bibliothèque de Southern Implants et décompressez-le.


Accédez au dossier de téléchargement de votre ordinateur et décompressez le fichier de la bibliothèque dans un répertoire de votre choix.

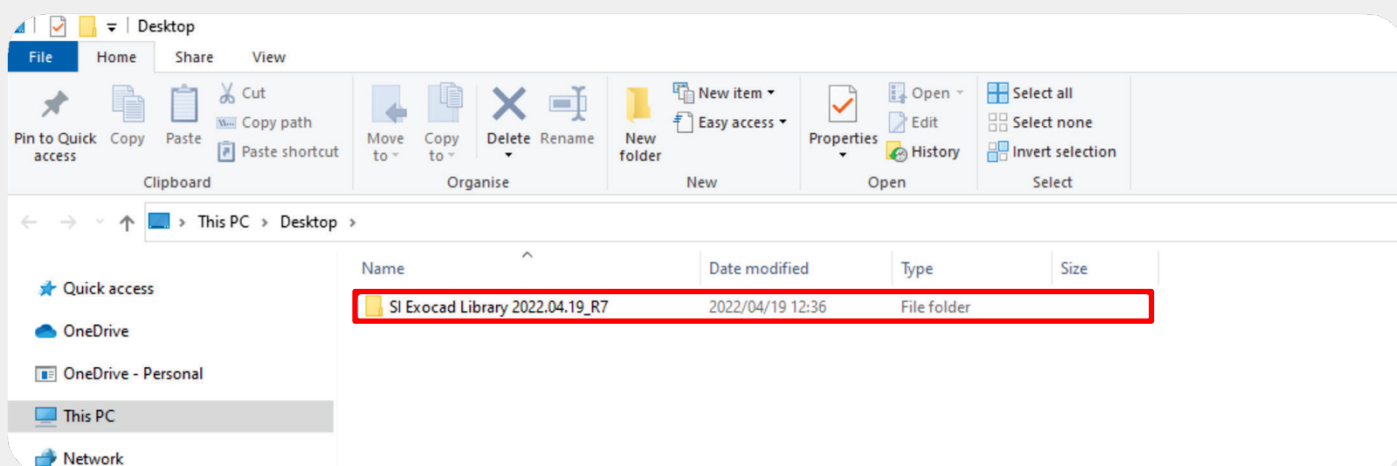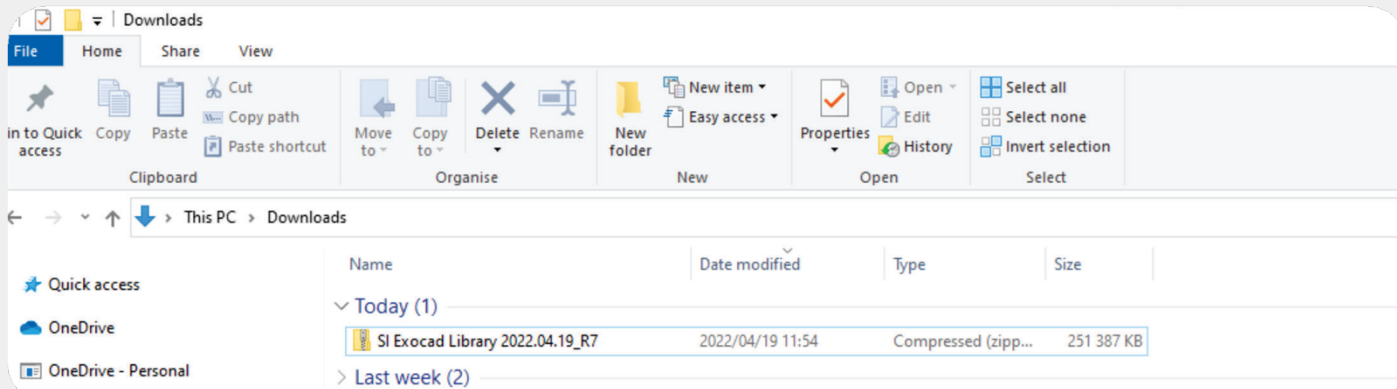

ETAPE 3.2

Ouvrez le dossier Exocad "Implant"



Ouvrez le dossier dézippé et ouvrez le dossier "Implant".

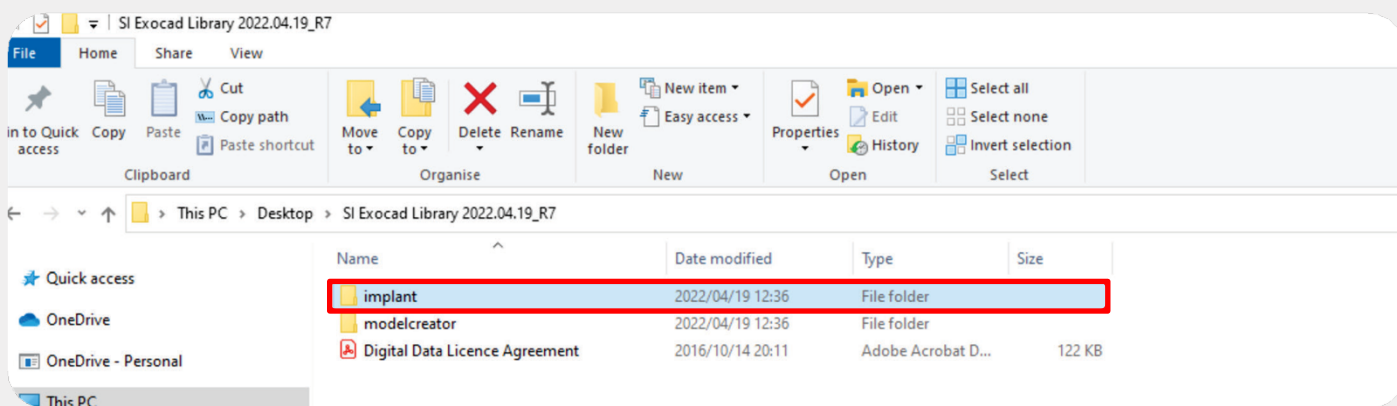

ETAPE 3.3

Copiez tous les dossiers de la bibliothèque d'implants dans le dossier d'Exocad.


Mettez en évidence tous les dossiers du dossier "Implant" et copiez-les dans le dossier de la bibliothèque d'implants d'Exocad (qui se trouve dans le dossier d'installation d'Exocad, dans le répertoire de fichiers DentalCADApp/library/implant).

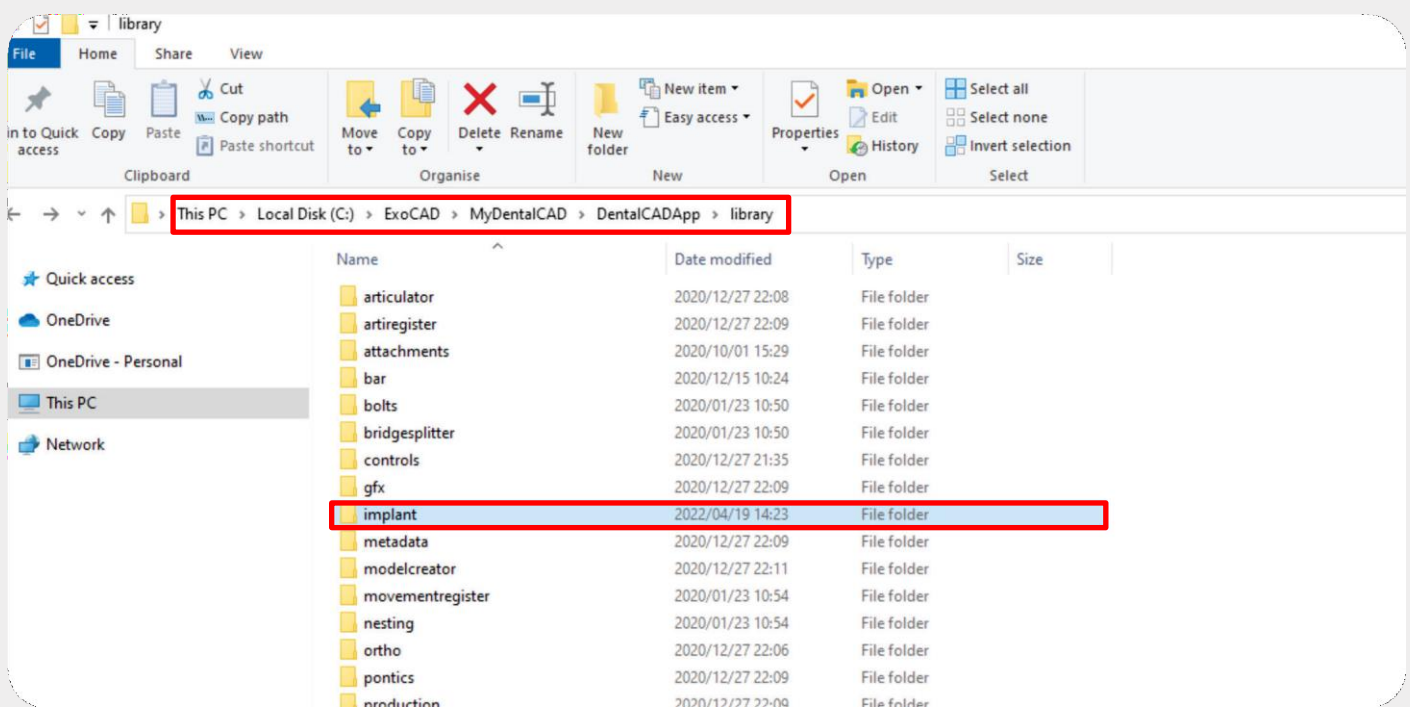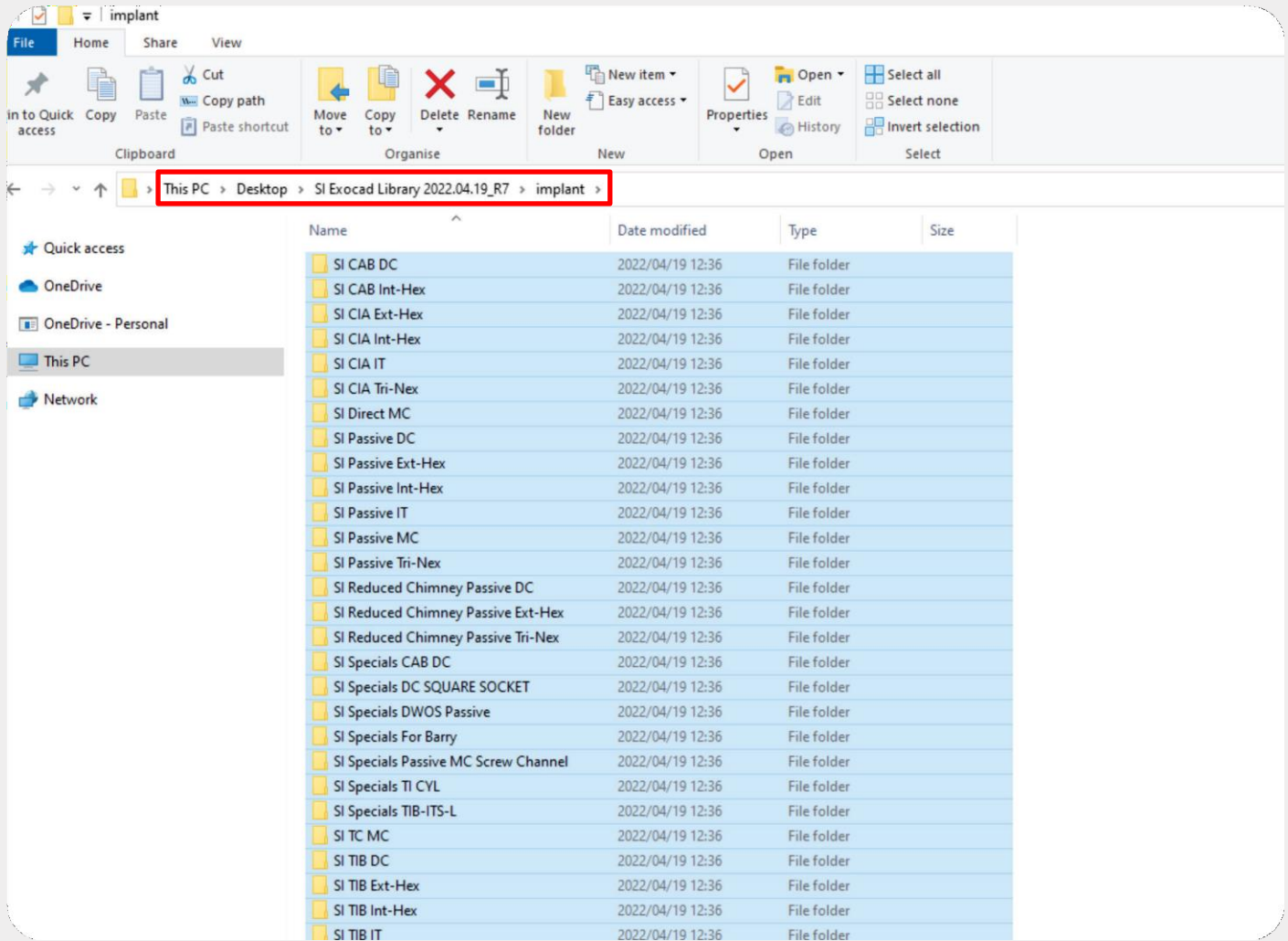

ETAPE 3.4

Ouvrez le dossier 'modelcreator' d'Exocad.



Revenez au dossier SI Exocad dézippé et ouvrez le dossier 'modelcreator'.

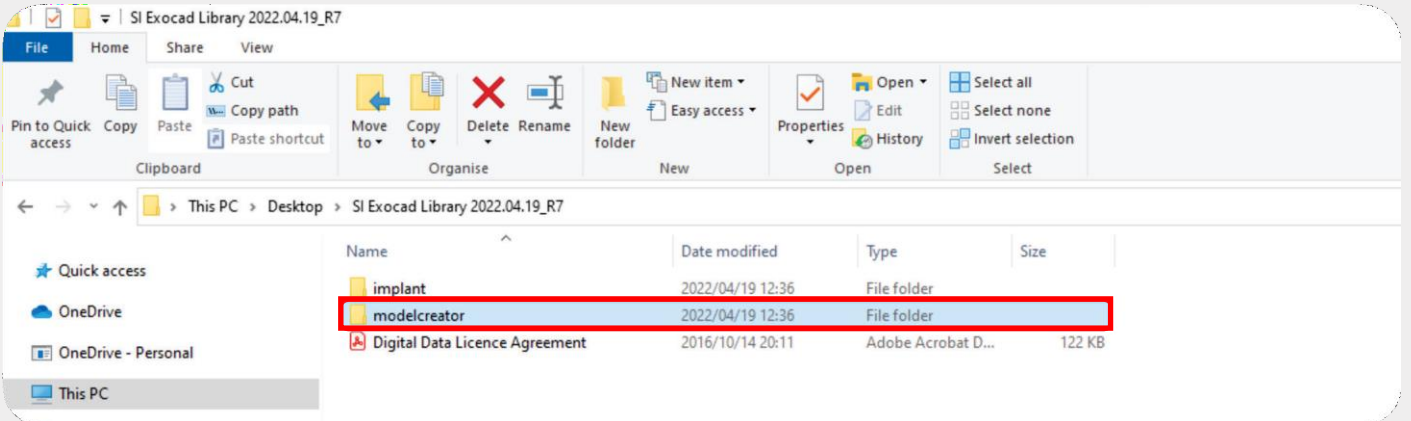

ETAPE 3.5

Copiez tous les dossiers de la bibliothèque du créateur de modèle dans le dossier Exocad.

Mettez en surbrillance tous les dossiers du dossier "modelcreator" et copiez-les dans le dossier de la bibliothèque d'implants Exocad modelcreator (qui se trouve dans le dossier d'installation d'Exocad, dans le répertoire de fichiers DentalCADApp/library/modelcreator/implants).

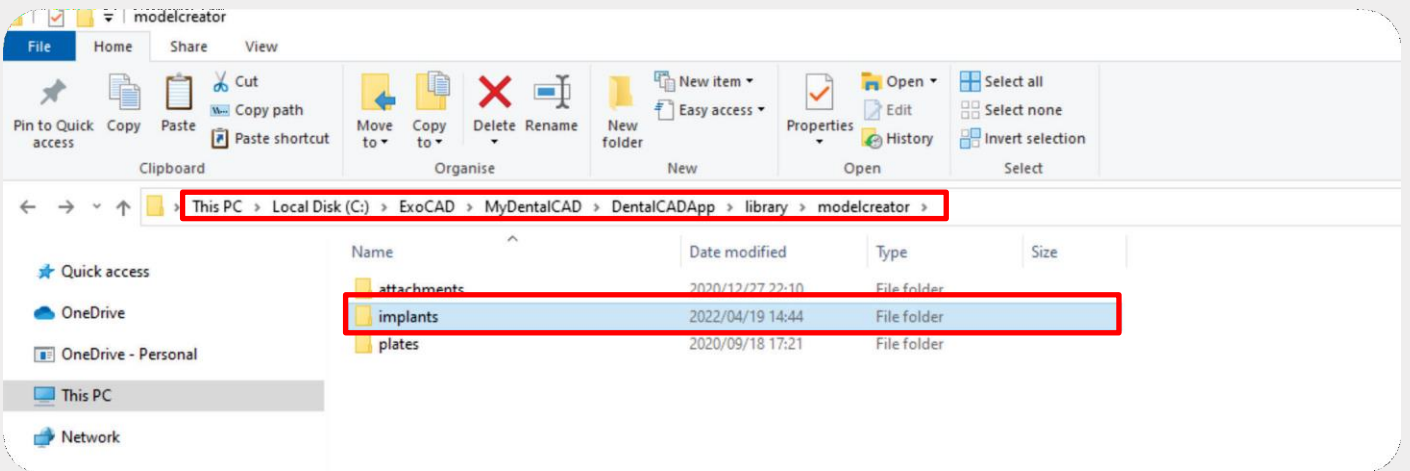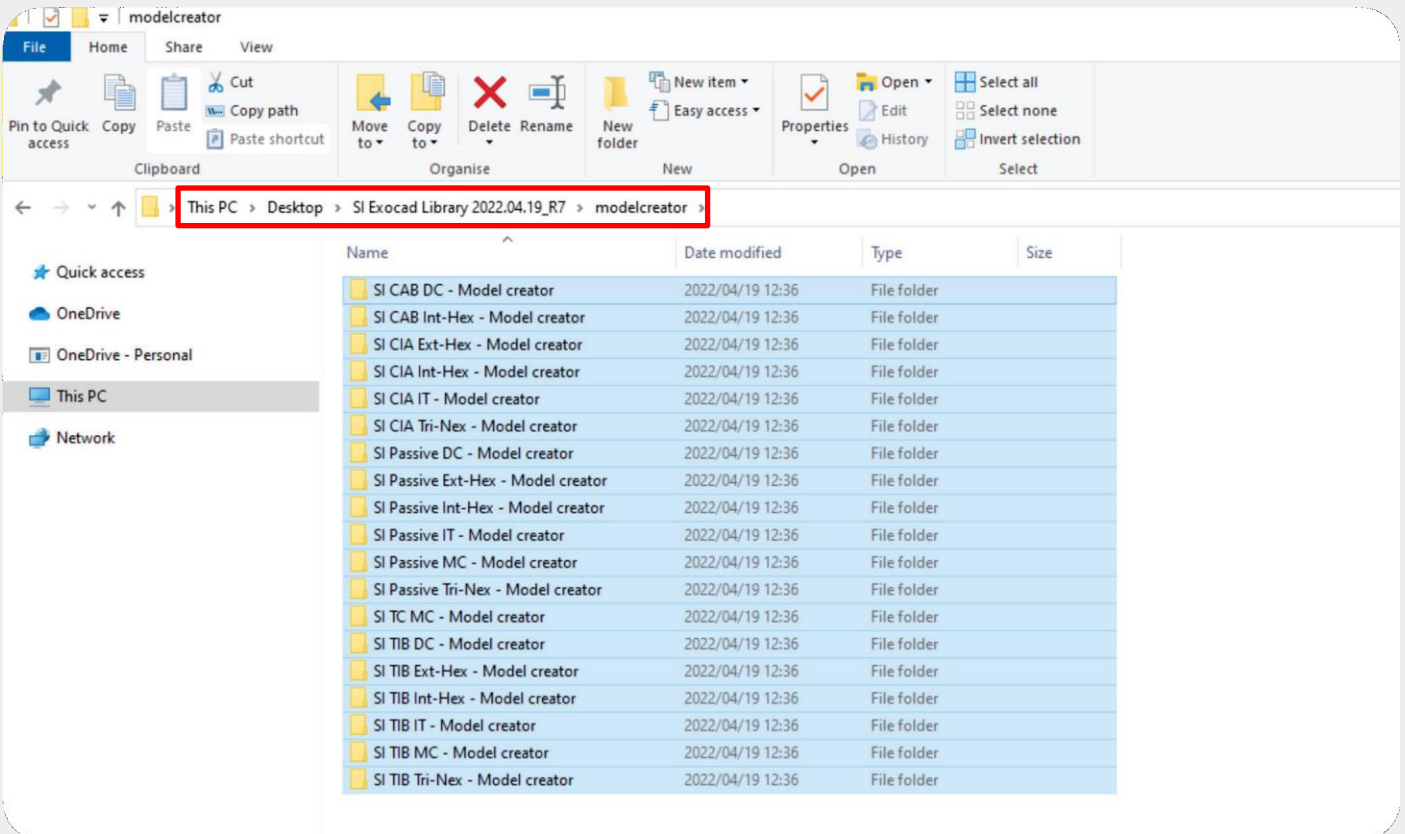

La bibliothèque Exocad est maintenant installée avec succès.